

Benutzung des EasySampler®

Entnahme der Proben

Die Testergebnisse sind nur verlässlich, wenn die Proben richtig entnommen werden!
Bitte lesen sie die Anweisungen vollständig durch, BEVOR die Proben entnommen werden! Wenn sie nicht alle Schritte der Probenentnahme verstehen, fragen sie ihren Arzt nach weiteren Anweisungen.




Stecken sie nicht ihren Finger in den Röhrchenhalter, da er eine scharfe Nadel enthält.



Vorbereitung


Das EasySampler Gerät ist gebrauchsfertig und geschützt durch einen verschlossenen Plastikbeutel.
Entfernen sie den Beutel vorsichtig von dem Probenentnahmegerät.

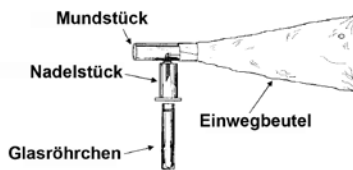


1. Nummerieren sie die Etiketten für die Glasröhrchen. Schreiben sie ihren Namen, den Namen ihres Arztes und das Datum auf jede der Etiketten. Schreiben sie auf ein Etikett den Zeitpunkt, an dem sie den Test starten und kleben sie das Etikett auf ein Glasröhrchen.

Probenentnahme


2. Halten sie den EasySampler in einer Hand und das Glasröhrchen in der anderen Hand. **Lockern oder entfernen sie die Deckel nicht von den vakuumverpackten Glasröhrchen; das macht die Röhrchen für den Test unbrauchbar.**

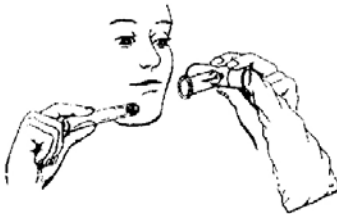


3. Setzen sie das Glasröhrchen # 1 bis zur Hälfte in das Nadelstück, mit dem Deckel zuerst. **DRÜCKEN SIE DAS TESTRÖHRCHEN NOCH NICHT IN DIE NADEL!** Atmen sie normal ein, schließen sie den Mund um das Mundstück und atmen sie normal aus.

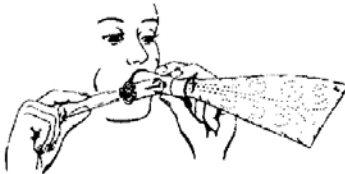

4. Wenn sie ausatmen, wird sich der blaue Beutel mit Luft füllen, welche durch eine kleine Öffnung am Ende des Beutels entlassen wird. Atmen sie weiter in das Mundstück, damit der Beutel aufgeblasen bleibt und schieben sie das Glasröhrchen bis ans Ende des Nadelstücks, damit das Endstück von der Nadel durchbohrt wird.

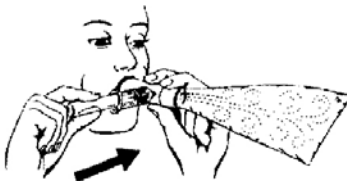

5. Blasen Sie weiterhin in den Beutel, entfernen dann nach 1-2 Sekunden das Glasröhrchen aus dem Nadelstück und legen sie es beiseite.

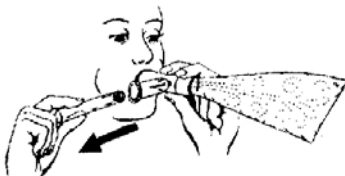

6. Wiederholen sie Schritt 1-5 mit den restlichen Glasröhrchen so oft und in den Zeitintervallen, die von ihrem Arzt verschrieben wurden.